

ISTRUZIONI PER L'USO - FRESE

Tutta la strumentazione chirurgica *Rmedical* viene prodotta con materie prime della migliore qualità fornite da aziende certificate.

Le frese e la strumentazione sono fabbricate in acciaio medicale o in carburo di tungsteno.

Si consiglia ad ogni modo di seguire le istruzioni qui sotto elencate per un'ottimale utilizzazione dei nostri prodotti con la contemporanea prevenzione di eventuali rischi anche involontari.

Sterilizzare prima dell'uso. Si consiglia di sterilizzare le frese con autoclave a vapore (classe B) con processo di sterilizzazione a 121°C per 20 minuti. La sterilizzazione dovrebbe essere effettuata ponendo gli strumenti taglienti in singola vaschetta, al fine di evitare possibili danneggiamenti al tagliente. E' consigliabile non sterilizzare insieme strumenti costruiti in metalli diversi per evitare la comparsa di macchie.

Alla fine di ogni intervento chirurgico e comunque prima di ogni nuova sterilizzazione, è indispensabile una corretta e completa pulizia dello strumento.

L'utilizzo delle frese Rmedical è garantito per un lungo periodo (comunque non inferiore a 25 utilizzi), ma è consigliabile un'attenta osservazione della loro efficacia tagliente. A tale scopo, al fine di evitare dannosi riscaldamenti dell'osso del paziente dovuto ad eventuale usura dell'utensile, è sempre consigliabile l'uso con velocità del manipolo non superiore a 200 g./min ed abbondante irrigazione esterna sul sito implantare con soluzione fisiologica possibilmente raffreddata a 5° C.

Si raccomanda di effettuare il fresaggio controllando il perfetto andamento assiale dell'operazione. A tale proposito si fa presente che eventuali pressioni laterali, oscillazioni, o colpi intermittenti verso il basso, potrebbero danneggiare l'efficienza e la precisione dell'utensile.

Le istruzioni sono scaricabili al sito www.rmedical.it

Rev. 01 data 04/2019



Rmedical s.r.l.
Via delle Rose, 72
35037 Teolo- PD

